

Nitrylex Stérile

Gants stériles d’examen et de protection, non poudrés, en nitrile, à usage unique

La stérilité de l’emballage n’est pas garantie si celui-ci est endommagé ou ouvert

UTILISATION PREVUE :

Gants stériles, d'examen et de protection, en nitrile, ambidextres, destinés à être portés sur les mains généralement en milieu chirurgical pour fournir une barrière contre les fluides potentiellement infectieux ou d'autres contaminants et pour protéger le patient en assurant la stérilité de l'environnement de la plaie. Ces gants sont destinés à un usage unique. Les gants sont classés dans la catégorie des dispositifs médicaux de classe I et dans la catégorie III des équipements de protection individuelle. Gants conçus pour protéger contre les substances et mélanges dangereux pour la santé et contre les agents biologiques nocifs. Gants conçus pour protéger contre les risques chimiques selon la norme EN ISO 374-1 et les risques liés aux micro-organismes (virus, bactéries et champignons) selon la norme EN ISO 374-5. Leur conception et leur étiquetage correspondent aux exigences de la réglementation sur les dispositifs médicaux et du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Les gants ne doivent être utilisés qu'en fonction de l'usage auquel ils sont destinés.

PRECAUTIONS :

Les résultats ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail en raison d'autres facteurs influençant la performance, tels que la température, l'abrasion, la dégradation, etc. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou mouillé. Séchez-vous soigneusement les mains avant de les enfiler. Risque de réutilisation : Ne pas réutiliser, la réutilisation peut provoquer une infection croisée et compromettre la sécurité. Les gants ne doivent pas être portés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement par des pièces mobiles de machines. Le niveau de performance de la dextérité est de 5. Ne pas re-stériliser.

AVERTISSEMENTS :

La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés dans la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant est égal ou supérieur à 400 mm – où le brassard est également testé) et ne concerne que le produit chimique testé. Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction des températures, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, les dégradations causées par le contact chimique, etc., peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. Avant utilisation, inspectez les gants pour détecter tout défaut ou imperfections. À usage unique.

COMPOSANTS/COMPOSANTS DANGEREUX :

Certains gants peuvent contenir des composants connus pour être une cause possible d'allergie chez les personnes qui y sont allergiques, qui peuvent développer une irritation de contact et/ou une réaction allergique. En cas de réaction allergique, consultez immédiatement un médecin.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil, à des sources d'ozone ou à des sources d'incendie. Conserver dans un endroit sec et frais, à une température de 5 à 35°C. Ne pas garder à proximité directe de solvants, d'huiles, de carburants et de lubrifiants.

INSTRUCTIONS DE TRANSPORT :

Transporter dans des conditions garantissant un niveau d'hygiène approprié, protégeant le produit contre la saleté. Le produit n'est pas thermolabile - les changements de conditions de température ou d'humidité pendant la période de transport à court terme n'affectent en aucune façon l'utilisabilité du produit, ses propriétés ou sa sécurité d'utilisation. Le produit ne nécessite pas de transport dans des conditions contrôlées en termes de température et d'humidité (confirmé sur la base de tests de vieillissement accéléré et d'analyse des risques).

DISPOSITION DES PRODUITS :

Les gants usagés doivent être traités comme des matériaux contaminés, c'est pourquoi les réglementations locales concernant l'élimination de ces matériaux doivent être appliquées.

DISPOSITION DES EMBALLAGES :

L'emballage principal (carton, distributeur) est constitué d'un matériau homogène, ne contient aucun élément en feuille, ne contient aucun type de matériau différent et ne nécessite pas de séparation en fractions. L'emballage est 100 % recyclable, conformément aux réglementations locales. L'emballage unitaire (enveloppe extérieure et enveloppe intérieure) doit être considéré comme du matériel médical contaminé et les réglementations locales relatives à la manipulation de ces matériaux doivent être respectées.

PROCÉDURE D'ENFILAGE DES GANTS

- a) Retirez les gants emballés (emballage intérieur) de la pochette (emballage extérieur). b) Ouvrez le gant à portefeuille pour voir les compartiments « Gauche » et « Droite ». c) Pincez les rabats supérieur et inférieur de l'emballage intérieur. d) À l'aide des rabats du milieu, ouvrez l'emballage en ne touchant que la marge de 1 pouce pour plus de sécurité. e) Assurez-vous que l'emballage ne se referme pas sur les gants après ouverture pour éviter toute contamination. f) À l'aide du pouce et des deux premiers doigts de la main non dominante, pincez le brassard du bord plié du poignet du gant pour la main dominante, en ne touchant que la surface intérieure du gant. g) Faites glisser la main dominante dans les gants en gardant la main pointée vers le bas et tirez vers le haut jusqu'au poignet. h) À l'aide de la main du gant, insérez les 4 doigts sous le poignet de l'autre gant et tirez le gant jusqu'au bras. i) Ajustez les gants si nécessaire

PROCÉDURE D'ENLÈVEMENT DES GANTS

- a) Saisissez le premier gant au niveau du poignet. b) Repliez-le et décollez-le, en le retournant au fur et à mesure. Une fois le gant enlevé, tenez-le avec votre main gantée. c) Pour retirer l'autre gant, placez vos doigts nus à l'intérieur du brassard sans toucher l'extérieur du gant. Décollez le gant de l'intérieur, en le retournant au fur et à mesure. Utilisez-le pour envelopper l'autre gant.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Date : 24.05.2024