

Description

Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™I.V.Advanced comporte un support film fin avec un adhésif sans latex de caoutchouc naturel. Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™I.V.Advanced présente des bords, des encoches et des renforts avec une bande de tissu doux pour renforcer l’étanchéité autour des cathéters et autres dispositifs. Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™ I.V.Advanced est perméable à l’oxygène et à la vapeur d’eau, permettant ainsi à la peau de respirer. Il est imperméable aux liquides, bactéries et virus. *Un pansement intact protège le site de toute contamination extérieure.

*Des essais in vitro ont démontré que le pansement de maintien 3M™Tegaderm™I.V. Advanced fait écran aux virus d’au moins 27 nm de diamètre, à condition que le pansement reste intact et ne présente aucune fuite. Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™ I.V.Advanced n’a pas été testé sur des nourrissons de moins de 40 semaines d’âge gestation-nel.

Utilisation prévue

Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™ I.V.Advanced peut être utilisé pour recouvrir et protéger les sites d’insertion de cathéters et les petites plaies, ainsi que pour maintenir les dispositifs sur la peau. Ne pas utiliser en remplacement de méthodes de suture primaire des plaies.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus sont des professionnels de santé.

Groupes de patients cibles :

Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™ I.V.Advanced est destiné aux personnes qui présentent des sites d’insertion de cathéters, de petites plaies ou d’autres dispositifs médicaux.

Contre-indications :

Aucune connue

Précautions

- Arrêter tout saignement sur le site avant d’appliquer le pansement.
- Ne pas étirer le pansement pendant l’application car la tension pourrait créer une lésion ou une blessure cutanée.
- S’assurer que la peau est propre, exempte de résidus de savon et de lotion et a pu sécher complètement avant d’appliquer le pansement afin d’éviter une irritation de la peau et de garantir une bonne adhésion.
- Le pansement peut être utilisé sur un site infecté uniquement sous la supervision d’un professionnel de santé.
- Les pommades antimicrobiennes contenant des polyéthylène glycols peuvent compromettre la résistance du pansement de maintien 3M™Tegaderm™ I.V. Advanced.
- Le pansement de maintien 3M™Tegaderm™I.V.Advanced ne doit pas être restérilisé par des rayons gamma, des faisceaux d’électrons ni à la vapeur.

Mode d’emploi

- Pour une adhésion optimale, appliquer le pansement de maintien 3M™Tegaderm™I.V. Advanced en appliquant une pression ferme mais délicate sur l’ensemble du pansement. La peau doit être propre et sèche. L’utilisation de pommades, crèmes ou lotions peut réduire significativement l’adhésion à la surface de la peau.
 - Une fois le pansement appliqué, appliquer la ou les bandelettes adhésives stériles pour mieux fixer la tubulure I.V. ou pour stabiliser le cathéter. Voir les figures sur l’emballage.
- L’encoche du pansement de 1685 a des perforations qui peuvent être ouvertes pour assurer la bonne adaptation autour des grands cathéters ou autres dispositifs. Ne pas réutiliser. Une réutilisation pourrait entraîner une infection ou une autre maladie/blessure. Ne pas utiliser le produit et le mettre au rebut si l’emballage stérile est endommagé ou ouvert involontairement.

Durée de conservation/Élimination

Pour connaître la durée de conservation du produit, consulter la date d’expiration imprimée sur la boîte. Ne pas utiliser le produit après la date d’expiration ou si celle-ci est absente ou illisible. Éliminer conformément à la législation du pays.

Informations destinées au client/à l’utilisateur


En cas d’incident grave lié au dispositif, veuillez le signaler à 3M et à l’autorité locale compétente (UE) ou à l’autorité locale de réglementation. Pour plus d’informations, contacter votre représentant 3M local ou nous contacter sur le site 3M.com et sélectionner votre pays.

Fabrique aux E.-U. avec des matériaux d’origines diverses

3M et Tegaderm sont des marques de commerce de 3M. Utilisées sous licence au Canada.© 2023, 3M. Toute utilisation non autorisée est interdite. Tous droits réservés.

Issue Date: 2023-04 - 34-2000-0394-4 - 0000819.1

Retrait lent avec un angle faible

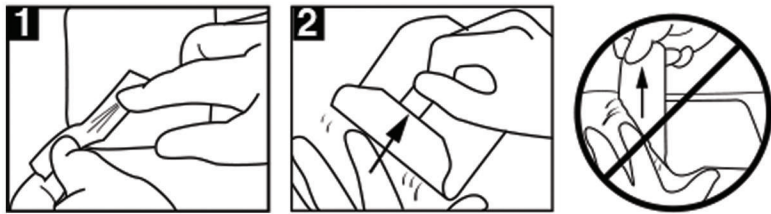

OR

Retrait en étirant

