

Robinet 4 voies

Finalité du produit

Contrôle directionnel de l'écoulement du fluide et pour fournir des sorties d'accès pour l'administration des solutions. Les utilisations typiques incluent la surveillance de la pression, l'administration de liquide intraveineux et la transfusion.

Instructions d'utilisation

Réserves:

- 1- Les instructions suivantes mentionnent les exigences techniques pour utiliser le produit, et n'excluent pas une formation informelle. Les indications peuvent ne pas représenter toutes les procédures existantes d'un établissement et ne doivent pas se substituer au jugement ou avis du praticien.
- 2- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
- 3- Le traitement des déchets médicaux doit être conforme aux exigences des lois et réglementations locales.

Instructions d'utilisation:

- 1- Le produit ne peut être utilisé que dans un état stérile.
- 2- Vérifiez que le produit soit en quantité suffisante pour que le système de gestion de fluide puisse être utilisé. Les robinets à diamètre de sortie standard peuvent être utilisés jusqu'à 3 bars (43psi). Les robinets et rampes à grand diamètre de sortie peuvent être utilisés jusqu'à 2 bars (29psi). La rampe FDG peut être utilisée jusqu'à 3 bars.
- 3- Aspire et régule le système de fluide selon l'hôpital ou les protocoles de procédure avec les dispositifs médicaux interventionnels.
- 4- Les signes sur la clé des robinets indiquent quand l'orifice est ouvert au passage de fluide.
- 5- La durée maximale d'utilisation est de 96 heures pour les robinets et rampes standards ainsi que pour les rampes collées. La rampe pour FDG peut être utilisée max 12 heures.

Précautions

- 1- Durant la manipulation utiliser les méthodes aseptiques appropriées.
- 2- La présence d'air dans le système d'injection peut amener à une embolie et dans de rares cas à la mort.
- 3- Toutes les connexions doivent être serrées manuellement. Un serrage trop important peut être la cause de craquelures et de fuites, qui peuvent conduire à une embolie ou l'exposition à des risques biologiques.
- 4- Une fois connecté, vérifier qu'il n'y ait pas de fuites, en aspirant. Une fuite peut amener à des contacts avec des matériaux représentant un risque biologique.
- 5- Ne pas utiliser de solutions contenant des lipides car ils peuvent engendrer des fuites. Les fuites peuvent générer des expositions à des risques biologiques.

Avertissements

- 1- Lire toutes les instructions avant utilisation.
- 2- Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.
- 3- Le produit est destiné à UNE UTILISATION UNIQUE.
- 4- Ré-utiliser un dispositif médical à usage unique crée un risque potentiel de contamination et/ou de mauvaise capacité de fonctionnement. Contamination et/ou limite de fonctionnalité du dispositif médical peuvent provoquer des blessures, maladies ou décès du patient.
- 5- Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

REV 05 - 2023-12 131608