

SOLUTION DE CHLORURE DE SODIUM STERILE A 0,9 %, EN RECIPIENT UNIDOSE POUR LAVAGE DES PLAIES**INDICATIONS:**

Lavage des plaies aiguës ou chroniques.

Performances: Le lavage des plaies débarrasse les plaies de tous les débris et salissures.

Bénéfices : La plaie est nettoyée ce qui permet de garantir un environnement optimal pour la cicatrisation de la plaie.

POSOLOGIE :

La fréquence n'est pas définie, mais peut être de plusieurs fois par jour.

MODE D'EMPLOI

Détacher une unidose et l'ouvrir en tournant la partie supérieure.

Rincer la plaie en utilisant la dose complète et en prenant garde de ne pas mettre en contact l'unidose avec la plaie. Rincer la plaie pendant 5 à 10 minutes.

Précautions d'emploi

Essuyer l'excédent de liquide uniquement sur la peau saine. L'irrigation des plaies doit être effectuée selon une technique aseptique stricte.

MANIFESTATIONS INDESIRABLES

Non attendues

CONTRE-INDICATIONS

Non applicable

MISE EN GARDE

Ne pas utiliser la même unidose pour les différentes utilisations.

USAGE EXTERNE. NE PAS INJECTER. NE PAS AVALER. USAGE UNIQUE.

Ne pas utiliser une unidose endommagée (fuite du liquide, déformation..) ou une unidose déjà ouverte au vu du risque de rapide contamination bactérienne. Si les symptômes persistent ou s'accroissent, consultez votre médecin. Veuillez rapporter tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif aux Laboratoires Gilbert - site internet : www.labo-gilbert.fr et/ou à l'Autorité Compétente nationale. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

CONDITIONS DE CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'unidose. [Si zone III et IVa :] Conserver à une température inférieure à 30°C.

GB_DM_FT_002 Version 7 of October 2023 (Extrait)